



ADD:SECURE

Navigil 580 Gps kello Kunta- ja alihankkijakoulutukset

Anton Honkanen
Team Leader Operations

For a safer and smarter world

Koulutuksen taustaa:

Tuomme Navigilin uuden 580 paikantavan turvakellon osaksi laitevalikoimaamme. Kellon myötä palveluihimme tulee uusi paketti ”Paikantava turvakello hyvinvointitiedolla” Koulutuksessa käydään läpi 580-kellon käyttöönottoa, toimintoja sekä hyvinvointitiedon sisältöä.

Jatkossa tilatessanne paketin 1,2, tai 3 lähtökohtaisesti toimitamme edelleen S1 kellon. On mahdollista, että näissä paketeissa tullaan myös käyttämään uutta kellomallia.




Kirjautuminen

Kellon taustapalveluun kirjaudutaan osoitteessa

<https://addsecure.navigil.io/>

Edellisen mallin kellolla on eri taustapalvelu ja oma kirjautumistunnus sekä eri kirjautumisosoite.

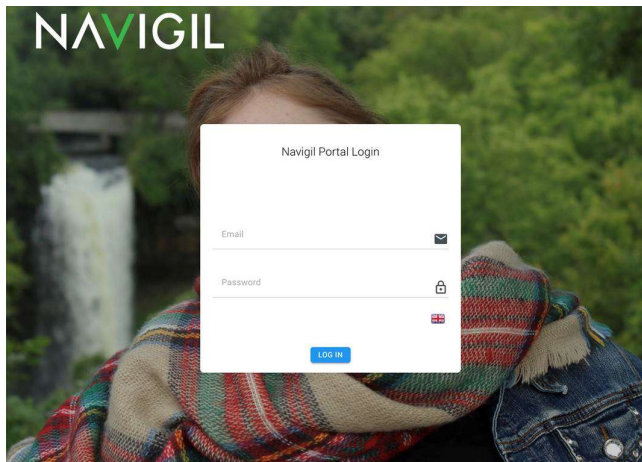

Phone number	Serial number	Status	Status date	Dashboard
Demo User +44723599682 Navigil Jamon lattuut 2	SILENT MODE T20000740 -fw-4.22.5 sim.telefonica		2022-10-07 10:10:15	NAVIGIL SERVICE
Rafael +44723599682 Navigil Jamon lattuut 2	IN USE T20000740 -fw-4.22.5 sim.telefonica		2022-10-07 10:10:15	RAFAEL

Saamme tähän helpotusta marras/joulukuun vaihteessa Navigilin koontisivun kautta!

Kellon tunnusten aktivointi

Jos olet saanut tunnukset kellon taustapalveluun sähköpostilla, kirjaudu kertakäyttöisillä tunnuksilla sisään.

Jos sinulla ei ole tunnuksia, ja haluat sellaiset, niin olethan yhteydessä Addsecureen.

- 0104088117
- turvapuhelin@addsecure.com



PERUSOMINAISUUDET

1.

Turvakellon käyttäminen

- Kellon mukana tulee laajat käyttöohjeet, joihin kannattaa tutustua ennen kellon käyttöön ottoa.
- 580 Kellossa on roaming sim kortti joten kello ei ole operaattori riippuvainen.



Akun alhaisen varaustason varoitus

- Turvakelloa suositellaan ladattavan kerran päivässä ylläpitolatausta.
- Akunkesto riippuu siitä, mitä ominaisuuksia kelloon on ohjelmoitu ja kuinka paljon kelloa paikannetaan.



Kun Turvakellon akunvaraustaso alkaa olemaan alhainen alkaa punainen merkkivalo vilkkua hitaasti.

Punainen valo alkaa vilkkumaan nopeasti kun akun varaus on hyvin alhainen.
Kun kellon akku on loppunut kokonaan kello sammuu ja viisarit siirtyvät 12:een.

Akun merkkivalot kun kello on kotimajakassa.

Kello latautuu



Punainen valo jää palamaan latauksen ajaksi.

Kellon akku on täynnä



Vihreä valo tarkoittaa, että akku täynnä

Digitaalinäytön kuvakkeet



Kellon paikannus on aktiivinen.
Kello tarkistaa sijaintia noin. 3 minuutin välein ja merkitsee sen kartalle



Digitaalinäytön kuvakkeet

Hätäseuranta tarkoittaa sitä että taustajärjestelmästä on aktivoitu paikannus joka tarkistaa sijaintia 30 sekunnin välein ja merkitsee sen kartalle.



Hätäseuranta on aktiivinen.

Digitaalinäytön kuvakkeet



Matkapuhelinverkkoa ei ole saatavilla.



Matkapuhelinverkko on yhdistetty.
Palkit ilmaisevat verkon signaalin voimakkuuden.

Digitaalinäytön kuvakkeet



ALOITTAMINEN

2.

Latausasema

- Aseta latausasema tasaiselle alustalle lähelle pistorasiaa tai jatkojohtoa.
- Kytke latausasema laturiin virtajohtolla.
- Kytke laturi pistorasiaan

Muistattehan tehdä kuukausittaisen koesoiton ja samalla tarkistaa että kellon kotimajakka lataa kelloa.



Kellon lataaminen

Aseta kello latausasemaan sivulleen painikkeet ylöspäin. Kello piippaa sen ilmoittamiseksi, että lataus on alkanut.



Akun varaustilan palkit vilkkuvat latauksen aikana.

LED-valo vilkkuu punaisena, kun kello latautuu, jos latauksen kanssa on ongelma, tarkasta että kotimajakan virtajohto on kytkettynä seinään ja toinen pää on kiinni kotimajakassa. LED-valo alkaa palaa jatkuvasti vihreänä, kun akku on täynnä.

Kellon määrittäminen

- Ensimmäisen latauksen aikana kello kytkeytyy päälle ja etsii matkapuhelinverkkoa.
- Kun yhteys on muodostettu, kellon määrittäminen tapahtuu automaattisesti.



Kellonviisarit ovat 12:n kohdalla, kunnes määrittäminen on valmis.

Mobiiliverkkoyhteyden tarkistaminen

Ennen käyttöönottoa
varmista, että verkko on
yhdistetty.



Jos verkkoa ei löydy,
siirrä latausasema
toiseen paikkaan.

Huomio! Voi kestää useita
minutteja tai jopa tunnin, ennen
kuin kello löytää
matkapuhelinverkon.

Käyttövalmis



Voit poistaa kellon latausasemasta, kun kello on:

- Täysin ladattu
- Kellossa on verkkoyhteys
- Kellon viisarit näyttävät oikeaa aikaa = Kellon määrittäminen on valmis

KÄYTTÖOHJEET

3.

Näytön aktivointi



Paina KRUUNUPAINIKETTA
aktivoidaksesi digitaalisen
näytön.




Valikoiden näyttäminen



Paina KRUUNUPAINIKETTA
selataksesi valikoita.

Valikon navigointi

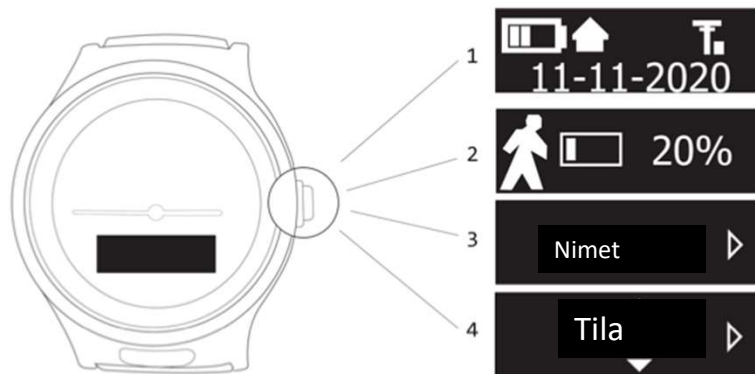

Näytöllä näkyy nuolia, jos valikossa on lisää sisältöä jota voi selata YLÖS ja ALAS painikkeilla .

Jos Nimet valikosta puuttuu nuolet, Navigil taustassa ei ole vielä määritettyjä yhteystietoja.

HUOMIO! Valikoiden näkyvyys riippuu kellon profiilista.

Tilanäyttö



Tilanäyttö näyttää akun varaustason, päivämäärän, kotimajakan, kellonajan ja verkkoyhteyden.

Aktiivisuus




- Aktiivisuusvalikossa näkyy kuluvanpäivän aktiivisuustavoitteen tila.
- Aktiivisuuden määrää on mahdollista seurata pidemmältä aikaväliltä taustapalvelussa ja verrata sitä omiin aikaisempiin tuloksiin.

Nimet

Nimet-valikossa näkyvät yhteystiedot, joille voidaan soittaa kellosta (pikavalintapuhelu).



3

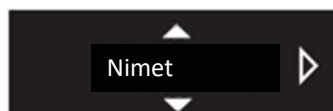

Selaa yhteystietojasi painamalla YLÖS- tai ALAS-painiketta.



HÄLYTYKSEN TEKEMINEN

4.

Hätäpuhelun soittaminen



1. Soita pitämällä
häätäpainiketta
painettuna n.3sek
ajan.



2. Kello soittaa turvapuhelinkeskukseen

Hätäviesti

- Jos verkkosignaali on huono eikä puhelua voida soittaa tai se muuten epäonnistuu, henkilö voi lähettää ääniviestin.
- Kello kertoo automaattisesti, miten viesti tallennetaan.
- Seuraavissa dioissa vielä näytetään miten se tehdään.



Hätäviestin tekeminen



Aloitetaan hätäpuhelua



"Hätäpuhelu epäonnistui, jätä
hätäviesti äänimerkin jälkeen



Sinulla on 20 sekuntia aikaa
tallentaa hätäviesti.

Hätäviestin tekeminen

Hätäviesti ei lähde jos kello on täysin gsm verkon ulkopuolella. Hätäviesti jää odottamaan verkkoon yhdistämistä



Odota kunnes tallennusaika päättyy.



"Hätäviestiä lähetetään"



"Hätäviesti vastaanotettu"

Miksi hätäviesti ominaisuus on hyvä?

- Puhelun soittaminen tarvitsee vakaan ja pitkäkestoisen yhteyden verkkoon.
- Hätäviestin lähettämiseen riittää heikompi signaali ja sen tarvitsee olla vain hetken saatavilla.
- Hätäviestin tallentaminen tapahtuu ns. Offline tilassa ja viesti lähtee kun kello saa hetkeksikin signaalin verkkoon.
- Nauhoitetusta hätäviestistä tulee ilmoitus hälytyksen vastaanottajalle.
- Hätäviesti on kuunneltavissa taustapalvelussa, esim. AddSecuren päivystäjien toimesta



PUHELUN SOITTAMINEN

5.

Tavallisen puhelun soittaminen




Paina KRUUNUPAINIKETTA kolmesti
siirtyäksesi Nimet-valikkoon.

Tavallisen puhelun soittaminen



Paina YLÖS- tai ALAS-painiketta valitaksesi henkilön, jolle haluat soittaa.

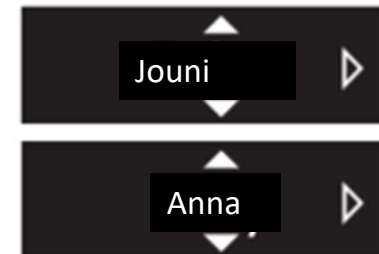

Yhteystiedot näkyvät NIMET valikossa siinä muodossa kun ne on lisätty Navigil taustapalveluun.

Tavallisen puhelun soittaminen



Paina ja pidä pohjassa painettuna n.3 sekuntia kruunupainiketta, kunnes kello lähtee soittamaan

Puhelun äänenvoimakkuuden säätäminen



Puhelun aikana voit säätää äänenvoimakkuutta korkeammaksi tai matalammaksi YLÖS- tai ALAS-painiketta painamalla.

Aktiivisuuden ja Hyvinvointitiedon seuranta

6.

Aktiivisuuden seuranta

Aktiivisuuden seuranta on tärkeää pitkäaikaisen hyvinvoinnin varmistamiseksi.

Navigil taustapalvelun avulla hoitajat ja perheenjäsenet voivat seurata henkilön aktiivisuutta päivittäisistä tasoista kuukausittaisiin suuntauksiin saakka.

Hyvinvointitietojen seuranta on lisäominaisuus, josta ei siirry tai lähde hälytystä turvapuhelinkeskukseen.



Aktiivisuus prosentti



Paina KRUUNUPAINIKETTA kahdesti nähdäksesi edistymisen kohti päivittäistä aktiivisuustavoitetta.




Päivittäinen aktiivisuustaso esitetään prosentteina päivittäisestä tavoitteesta.




Aktiivisuustason seuranta

Näet aktiivisuustason kellontaustapalvelun koontinäytöltä näistä kahdesta kaaviosta.

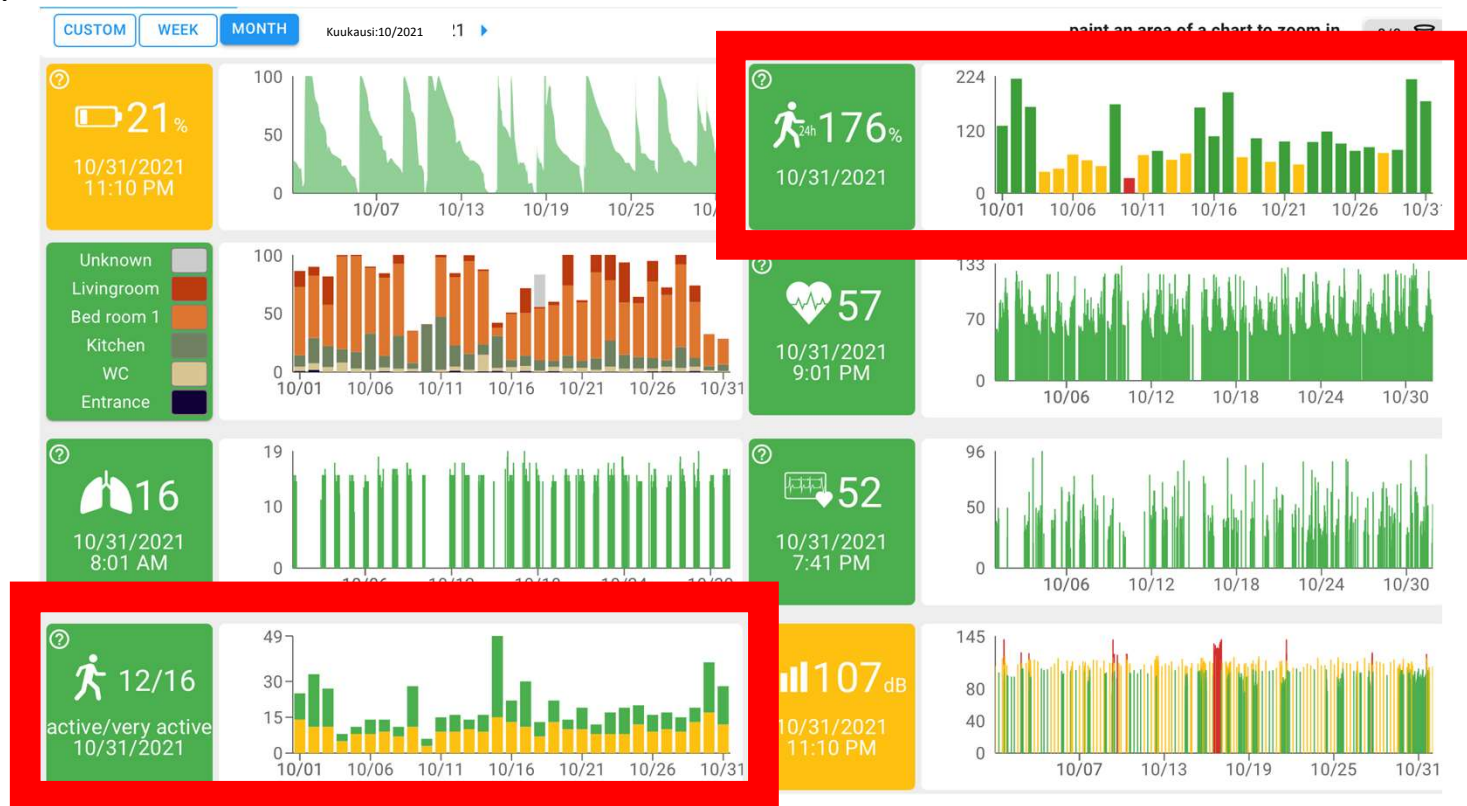

Päivittäisen aktiivisuustavoitteen kaavio kellontaustapalvelun ohjauspaneelissa


- Vihreä tarkoittaa, että yli 80 % päivittäisestä tavoitteesta on saavutettu.
- Keltainen tarkoittaa, että 30–80 % päivittäisestä tavoitteesta on saavutettu.
- Punainen tarkoittaa, että alle 30 % päivittäisestä tavoitteesta on saavutettu.
- Jos pylvästä ei näy, kelloa ei ole käytetty kyseisenä päivänä.

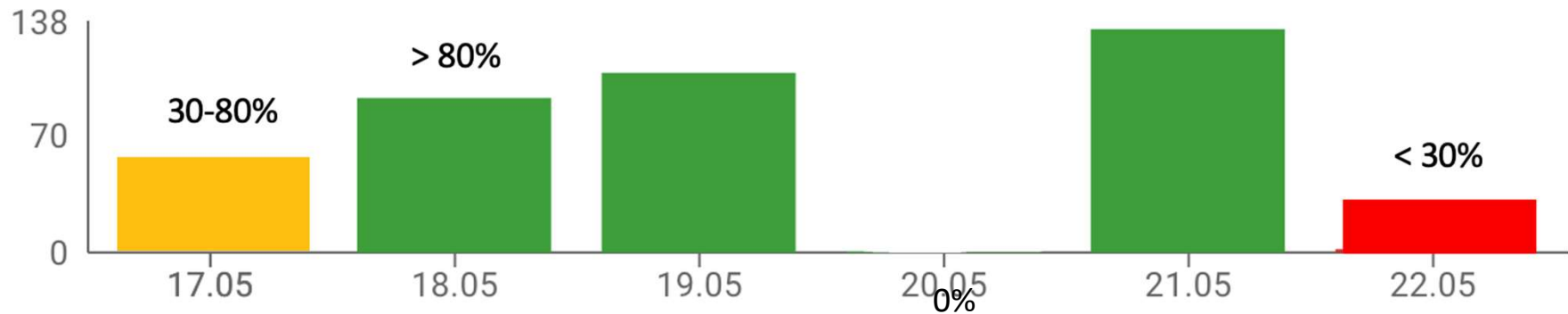

Yksityiskohtainen aktiivisuustaso

Kunkin pylvään korkeus näyttää päivän kokonaisaktiivisuuden jaettuna aktiiviseen aikaan ja erittäin aktiiviseen aikaan.


- Keltainen tarkoittaa normaalia aktiivisuustasoa
- Vihreä tarkoittaa korkeaa aktiivisuustasoa.

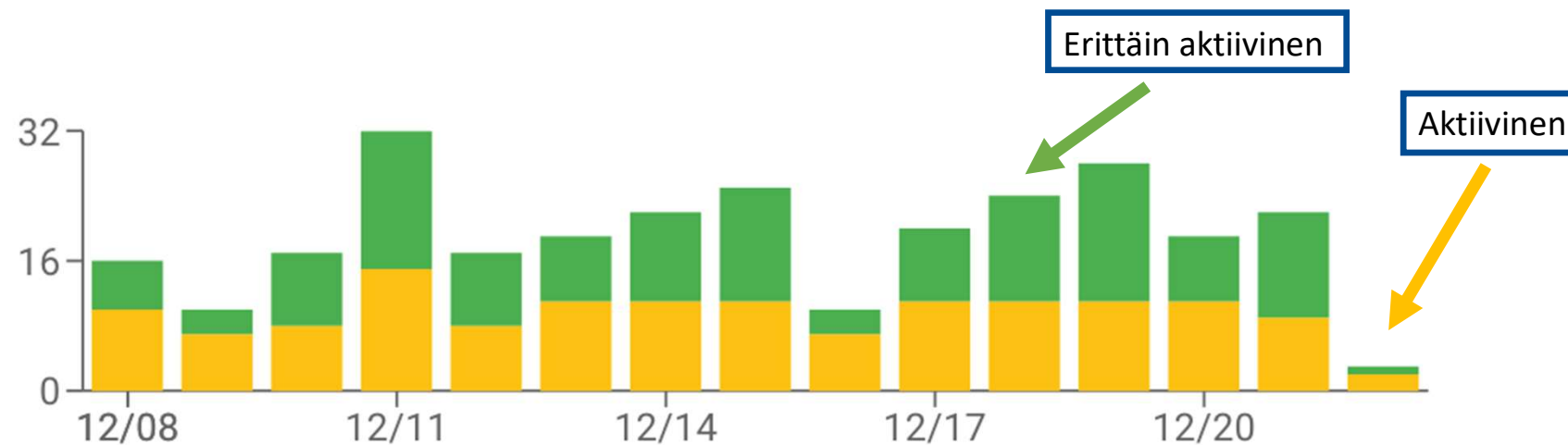

Yksityiskohtainen aktiivisuustaso

Voit zoomata kaavioon nähdäksesi kahden päivän jaksojen tiedot. Zoomatusta kaaviosta näkyy, milloin seurattava henkilö on herännyt ja mennyt nukkumaan, sekä päivittäisiä rutiineja, kuten ulkona kävelyn ja yöllä tapahtuvan kävelyn ja WC:ssä käynnit.

Yöaikainen aktiivisuus


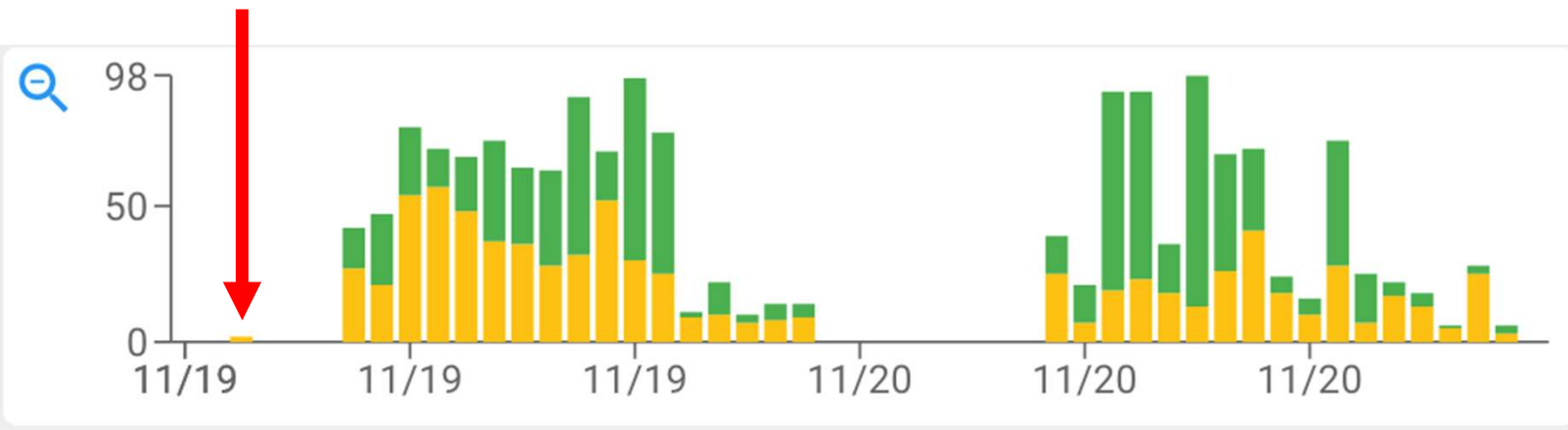


Hyvinvoinnintyöpöytä

7.


Hyvinvoinnin työpöytä

Hyvinvoinnin työpöytä löytyy vasemmanpuoleisesta valikosta.

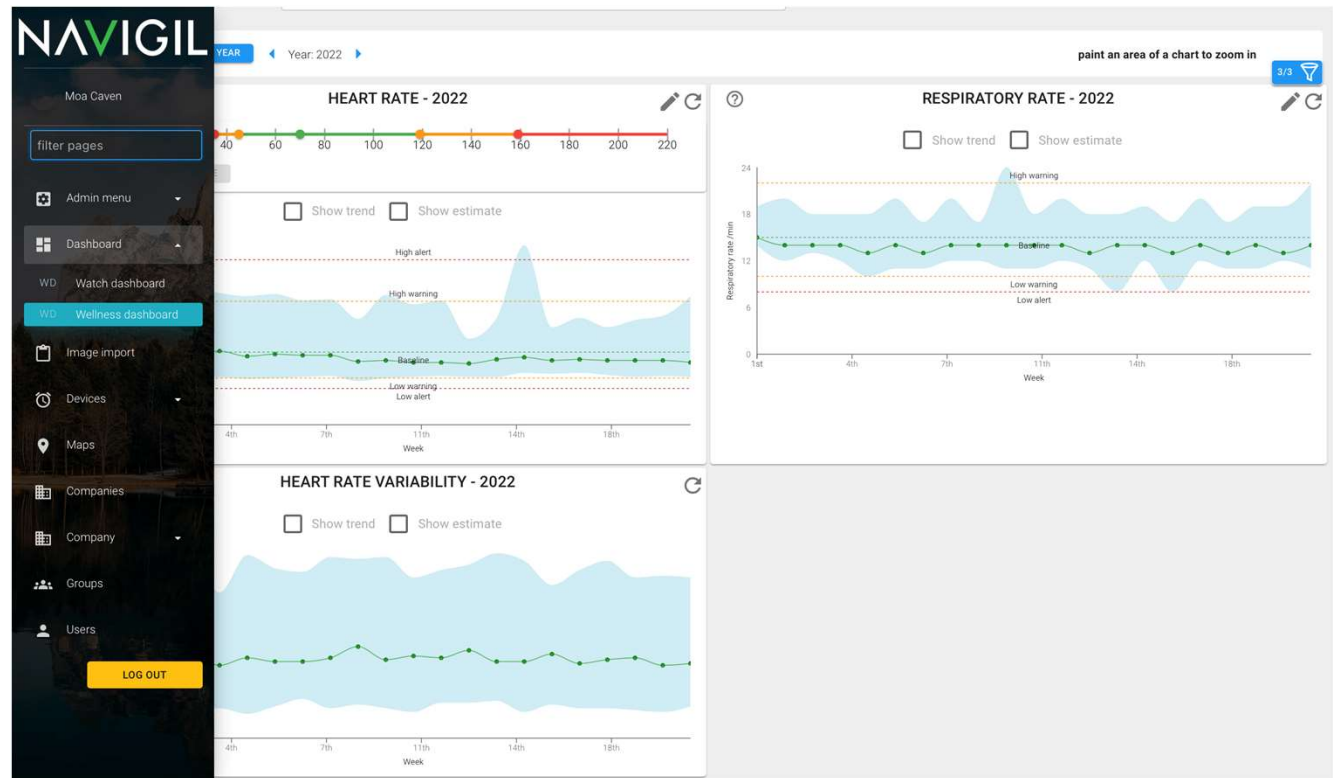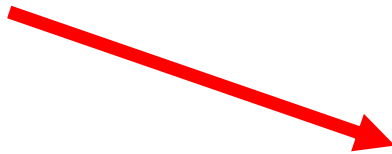

Valitse laite

Valitse laite

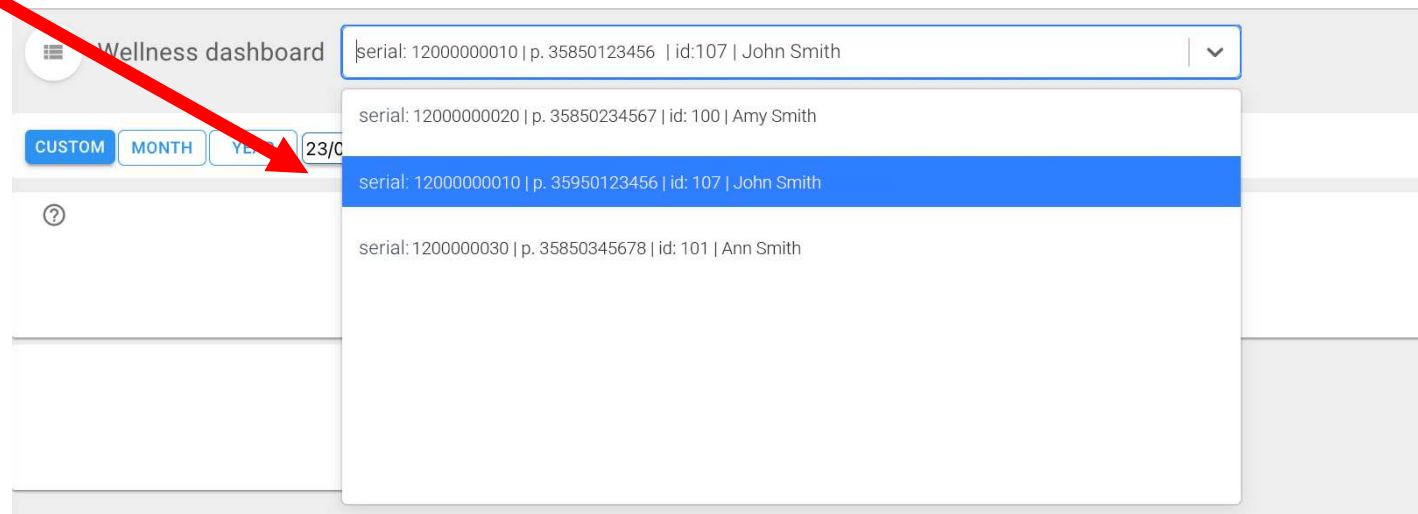


The screenshot shows a 'Wellness dashboard' interface. At the top, there is a search bar containing the text 'serial: 12000000010 | p. 35850123456 | id:107 | John Smith'. Below the search bar, there are several buttons: 'CUSTOM', 'MONTH', 'YEAR', and '23/0'. A dropdown menu is open, displaying a list of items. The first item is 'serial: 12000000020 | p. 35850234567 | id: 100 | Amy Smith'. The second item is 'serial: 12000000010 | p. 35950123456 | id: 107 | John Smith', which is highlighted in blue. The third item is 'serial: 12000000030 | p. 35850345678 | id: 101 | Ann Smith'. A red arrow points from the text 'Valitse laite' to the dropdown menu.

Hyvinvoinnin työpöytä

Työpöydällä voit tarkastella yksityiskohtaisia kaavioita henkilön

- sykkeestä
- hengitystiheydestä
- Sykeväli vaihtelusta

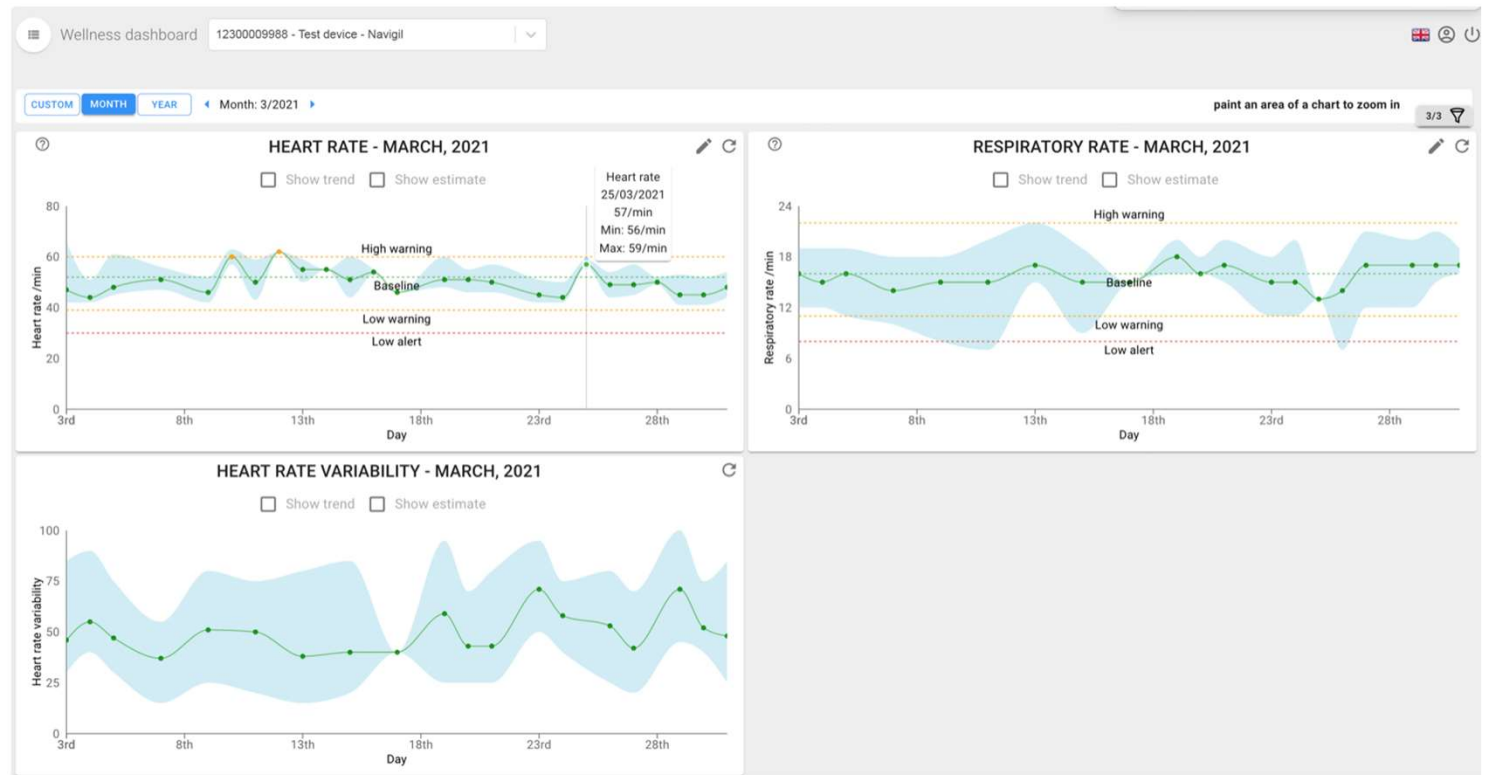


Hyvinvoinnin työpöytä

Aseta aikajakso, joka näytetään kaavioissa.


Vihreä viiva osoittaa päivän keskiarvon. Sininen väri näyttää päivän minimin ja maksimin.

Vie hiiren osoitin kaavion pisteeseen päälle nähdäksesi kyseisen päivän maksimi-, minimi ja keskiarvon.

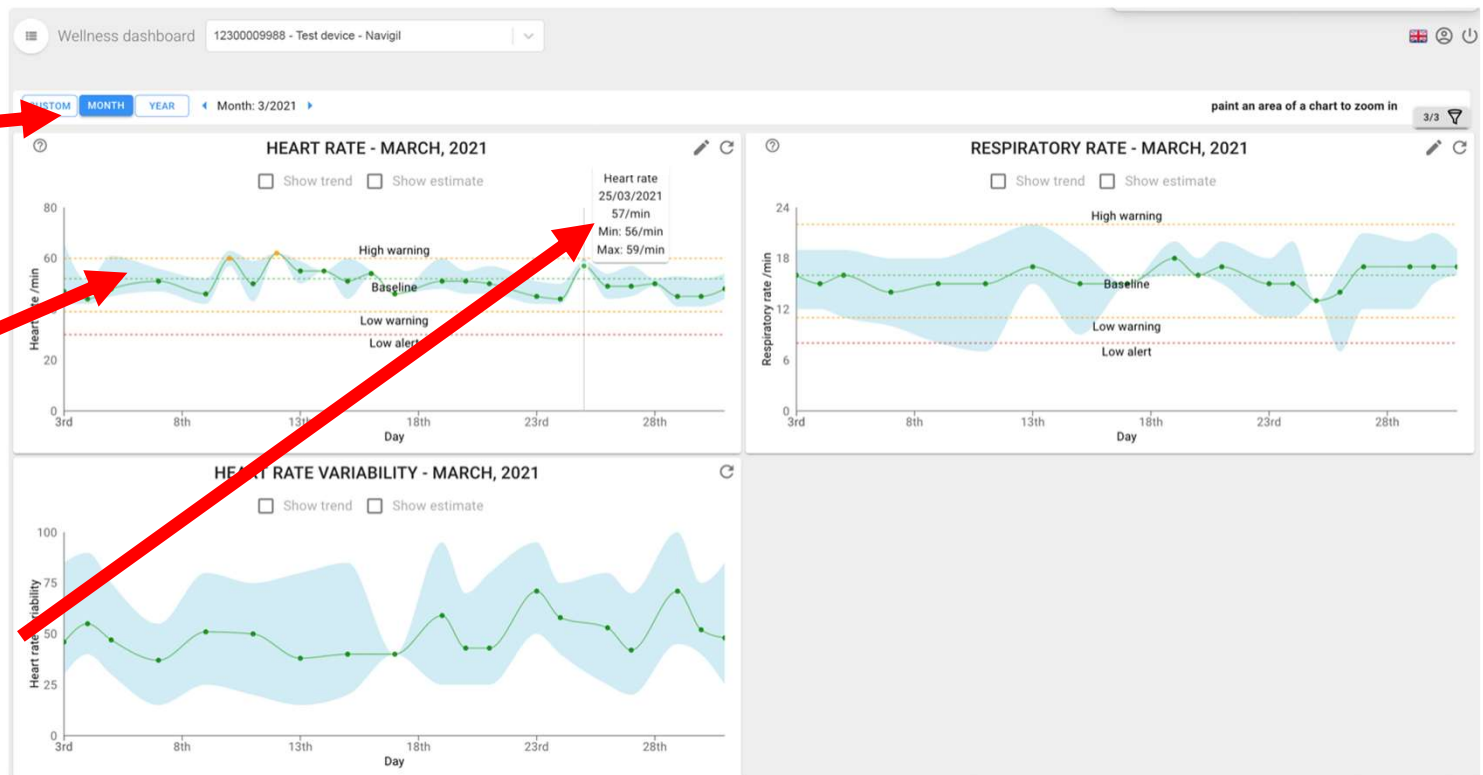


Näytä keskiarvo

Ota käyttöön nähdäksesi
mittaustuloksen kehitys
(kuvassa musta viiva)

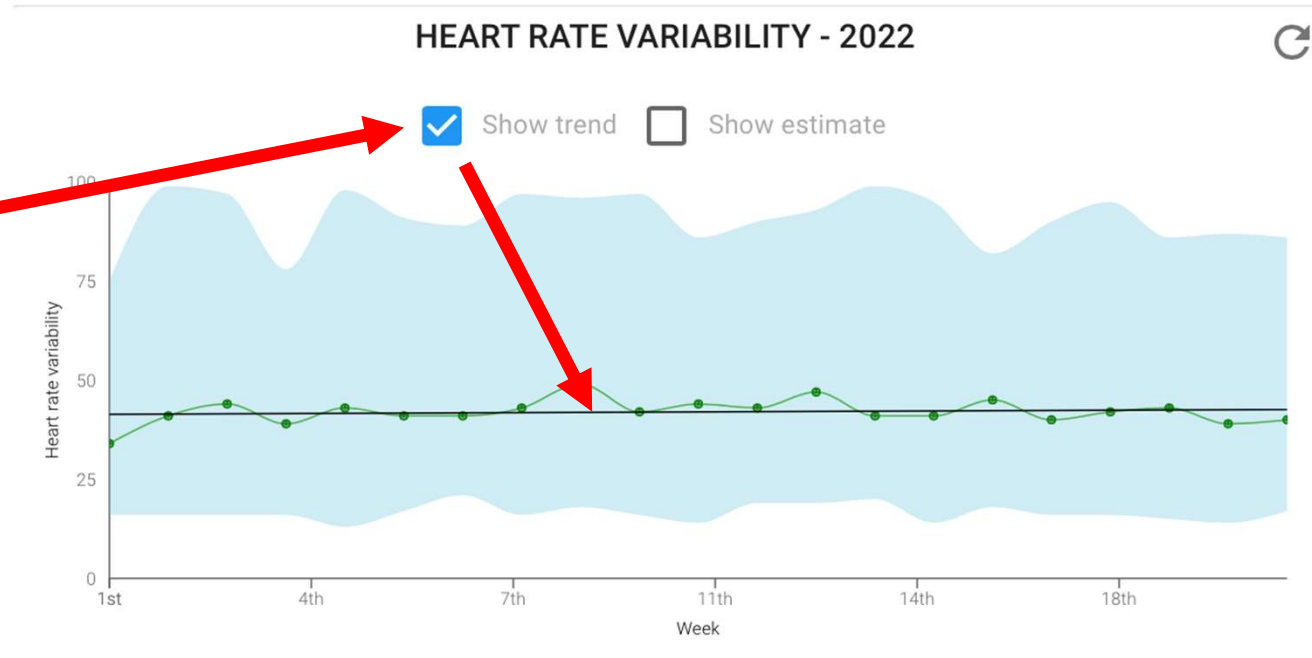

Näytä suuntaus

Ota käyttöön nähdäksesi laskettu ennuste kehityssuunnasta. Kuvassa musta katkoviiva

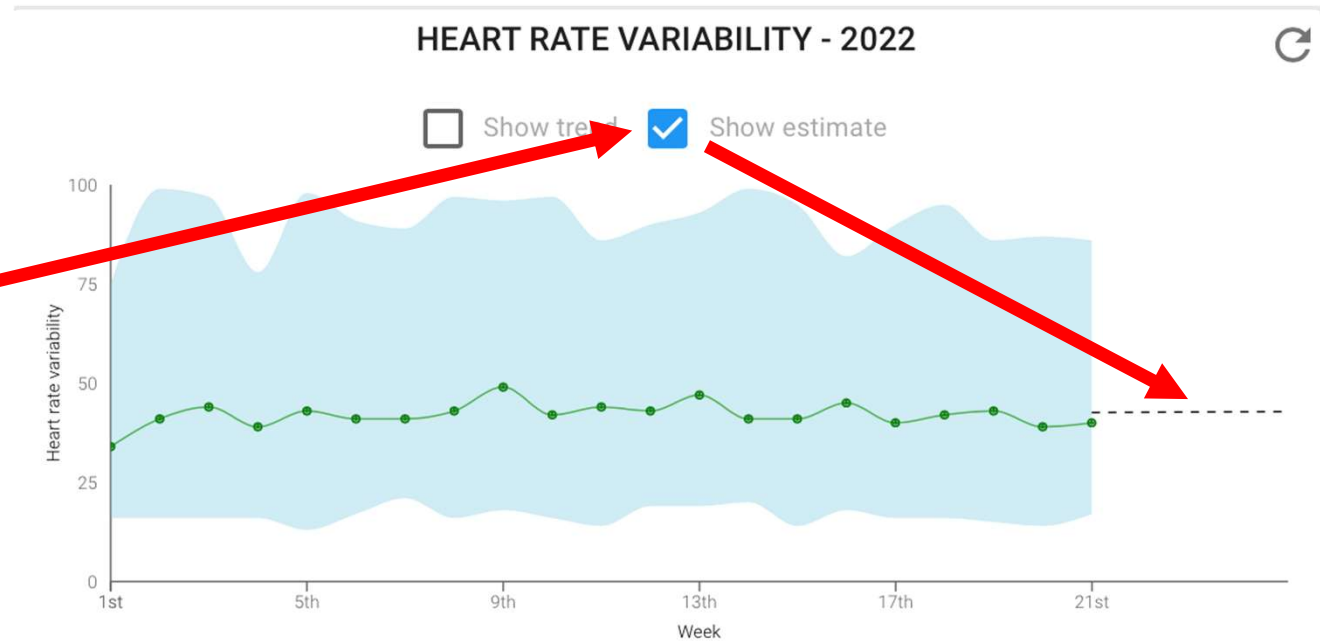

Kellon työpöytä

8.

Kellon työpöytä

Kellon työpöytä on ensisijainen paikka kellon tilan ja kellon käyttäjän toiminnan seuraamiseen.

Kellon työpöytä löytyy vasemmalla olevan valikon Dashboard (koontinäyttö) -kohdasta.



NAVIGIL board

Jenni Sairanen

filter pages

- Dashboard
- WD Watch dashboard**
- WD Wellness dashboard
- Devices
- Maps
- Company
- Groups
- Users

LOG OUT

Recorded SOS message 06/2021 4:31 PM

CALIBRATE

UPDATE

FIND WATCH

MAPS

STATUS LOG INFO CALL LOG SOS MESSAGES

MONTH 09/13/2022 → 09/27/2022 SET RANGE

100
50
0
09/13 09/16 09/19 09/22 09/25

153%
09/26/2022

70
09/27/2022 8:25 AM

Kellon työpöytä

Viimeisin hälytys

Kalibroi kellonaika toimintoa käytetään mikäli kello näyttää väärää aikaa.

Paikanna painike näyttää viimeisen sijaintitiedon.

Aloita hätäpaikannus tarkistaa sijaintia 30 sekunnin välein ja merkitsee sen kartalle.

The screenshot shows the mobile application interface. At the top, there is a status bar with the phone number '1200001555', the name 'Kiki testikello', and a 'Secure' indicator. Below this is a yellow status bar with a signal strength icon, '96%' battery, and 'Lataus keskeytetty' (Charging interrupted) with the time '12.10.2022 07:43'. A white box below the status bar displays: 'Statuspäivämäärä: 17.10.2022 07:00', 'Puhelinnumero: 447723599681', 'Verkon signaali: 101', and 'Viimeisin sijainti: 2d 1h 44min'. To the right of the status bar is a vertical menu with four buttons: 'KELLON KALIBROINTI' (green), 'PÄIVITÄ' (green), 'KARTTA' (blue), and 'KALIBROINTI' (blue). The main area is a map showing a location marked '1' near 'Mekaniikontie' and 'Porvoonjoki'. At the top right of the map area are two green buttons: 'PAIKANNA' and 'ALOITA HÄTÄPAIKANNUS'. At the bottom right of the map area are controls for zooming (+/-) and a 'Terms of Use' link.

Viimeisimmän sijainnin aika.


Pikakuvake karttoihin

Etsi kello toiminto on tulossa 2022 aikana: tämä saa kellon piippaamaan jotta se olisi helpompi löytää.

Kellon sijainti

Kellon työpöydän välilehdet


Tarkemmat tiedot saat painamalla valikon auki

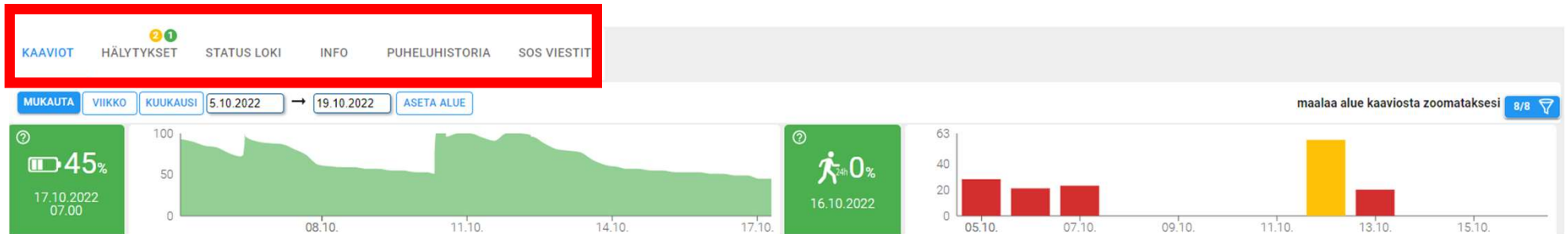


Kaaviot

Aseta ajanjakso,
joka näytetään kaavioissa

Raportoidut arvot valitulta ajanjaksolta.
Näet kunkin päivän tiedot siirtämällä
hiiren kaaviossa olevan palkin päälle.

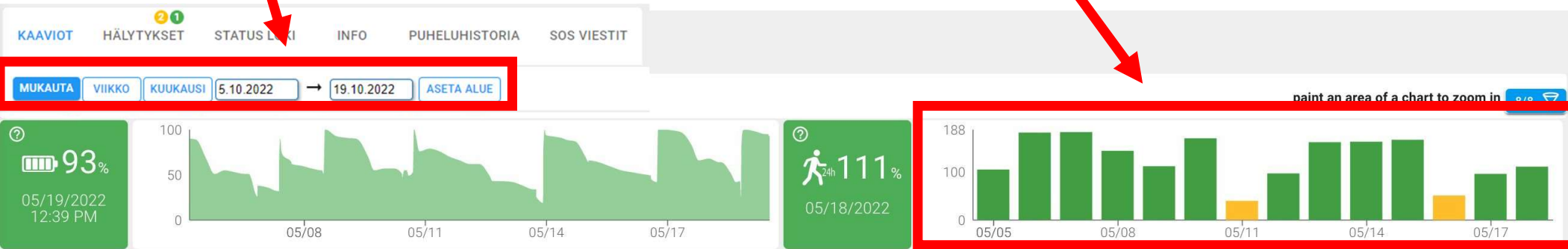

Kaaviot

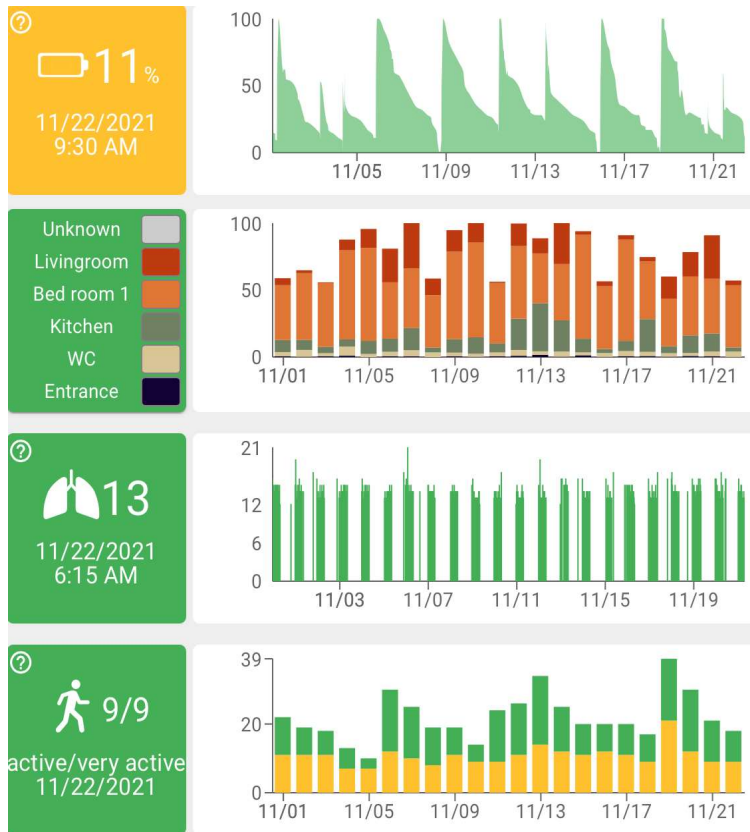


Akun tilan kaavio näyttää viimeisimmän akun varaus prosenttin ja lataus historian.

Hengitystiheys on arvioitu tiheys, joka perustuu kellon käyttäjän sykemittauksiin. Oletuksena hengitystiheys mitataan ja raportoidaan noin 10 minuutin välein.

Kunkin palkin korkeus näyttää päivän kokonaisaktiivisuuden. Keltainen tarkoittaa normaalia aktiivisuustasoa, vihreä tarkoittaa korkeaa aktiivisuustasoa.

Kaaviot

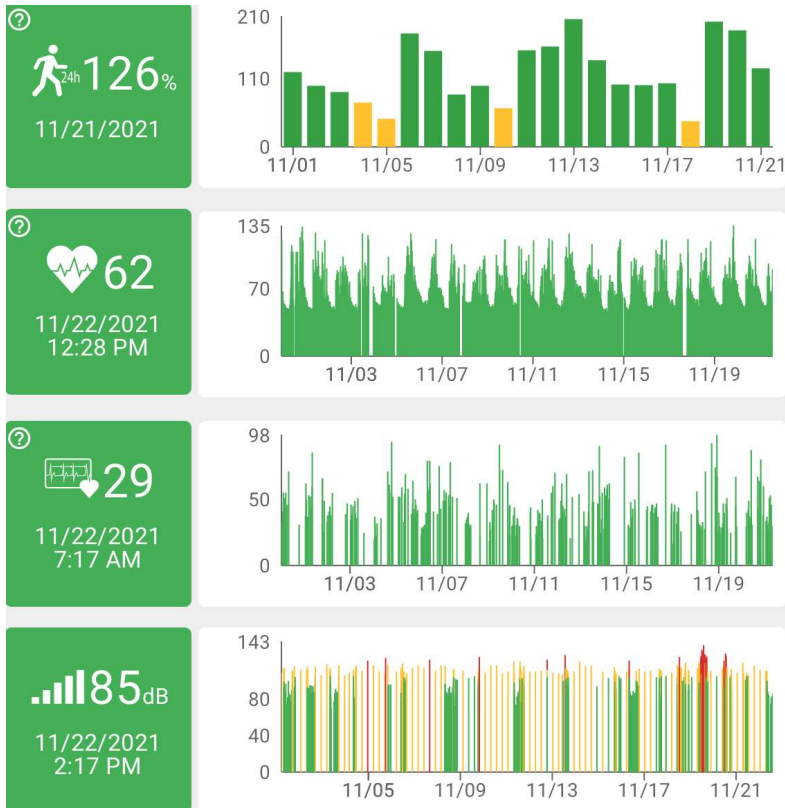

Aktiivisuustavoite kaaviossa visualisoidaan pylväänä viimeisten 24 tunnin aikana tavoitteen saavuttamisen prosenttiosuus kullakin päivältä.

Sydämen sykkeen kaavio näyttää kellon käyttäjän sydämen sykkeen aikana, jolloin aktiivisuus on vähäistä tai sitä ei ole ollenkaan eli ns. leposykkeen. Sydämen syke mitataan ja raportoidaan noin 10 minuutin välein.

Sydämen sykevaihtelu (HRV) tarkoittaa sydämen lyöntien välistä aikaeroa, joka tunnetaan myös nimellä R-R-intervalli. HRV-lukemat mitataan ja raportoidaan noin 10 minuutin välein.


Kellon signaalinvoimakkuutta voi seurata kaaviosta. Vihreä tarkoittaa hyvää signaalia ja punainen puolestaan heikkoa signaalia

Hälytykset



Uudet ilmoitukset,
hälytykset ja
varoitukset

KAAVIOT **HÄLYTYKSET** STATUS LOKI INFO PUHELUHISTORIA SOS VIESTIT

Kuitattavat varoitukset ja hälytykset

	Turva-alueelta poistuminen
12.10.2022	16.41

Varoitukset ja hälytykset

 96%	Lataus keskeytetty
12.10.2022	07.43
	Kellon kalibroituvirhe
15.10.2022	01.00

Statusloki

Varoitukset ja hälytykset tulojärjestyksessä.

KAAVIOT HÄLYTYKSET STATUS LOKI INFO PUHELUHISTORIA SOS VIESTIT

MUKAUTA VIIKKO KUUKAUSI 5.10.2022 → 19.10.2022 ASETA ALUE

1 SOS 6 5 3 1 1

Search

Luotu	Status
14.10.2022 01.00	kellon kalibrointivirhe
12.10.2022 12.44	häätäpuhelu aloitettu
12.10.2022 11.14	turva-alueelta poistuminen
12.10.2022 07.43	laite laturissa
10.10.2022 13.35	akku on täynnä
10.10.2022 13.35	laite laturissa
10.10.2022 08.42	akku on täynnä
10.10.2022 07.50	laite laturissa
7.10.2022 14.01	turva-alueelta poistuminen
7.10.2022 05.00	ei yhteyttä

Aseta ajanjakso, joka näytetään lokeissa.

KAAVIOT HÄLYTYKSET STATUS LOKI INFO PUHELUHISTORIA SOS VIESTIT

MUKAUTA VIIKKO KUUKAUSI 5.10.2022 → 19.10.2022 ASETA ALUE

1 SOS 6 5 3 1 1

Search

Luotu	Status
14.10.2022 01.00	kellon kalibrointivirhe
12.10.2022 12.44	häätäpuhelu aloitettu
12.10.2022 11.14	turva-alueelta poistuminen
12.10.2022 07.43	laite laturissa
10.10.2022 13.35	akku on täynnä
10.10.2022 13.35	laite laturissa

Statusloki

Lajittele tilat napsauttamalla kuvaketta.

Turva-alueelta poistumisilmoitukset

häätäpuhelu aloitettu

Luotu	Status
12.10.2022 12.44	häätäpuhelu aloitettu

Rivejä per sivu: 10 1-1 / 1

turva-alueelta poistuminen

Luotu	Status	Kuittausaika
12.10.2022 11.14	turva-alueelta poistuminen	12.10.2022 13.56
7.10.2022 14.01	turva-alueelta poistuminen	10.10.2022 07.51
6.10.2022 13.13	turva-alueelta poistuminen	7.10.2022 08.03
6.10.2022 10.32	turva-alueelta poistuminen	6.10.2022 10.42
6.10.2022 10.02	turva-alueelta poistuminen	6.10.2022 10.30
5.10.2022 14.02	turva-alueelta poistuminen	6.10.2022 09.07

Rivejä per sivu: 10 1-6 / 6



KIITOS OSALLISTUMISESTA !

Anton Honkanen
Team Leader Operations
0104088117
turvapuhelin@addsecure.com

ADDSECURE

ADD:SECURE